



# DESIFOR- QUICK PLUS

## Flüssiges Schnelldesinfektionsmittel

### Einsatzbereich

Gebrauchsfertiges, alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel zur rückstandsfreien und schnellen Desinfektion aller Bereiche in medizinischen Einrichtungen und in der Lebensmittelindustrie. Gem. MPG: Aldehydfreie Desinfektion u. Reinigung von alkoholbeständigen nichtinvasiven Medizinprodukten. Gem. Biozidprodukte-VO: Zur Desinfektion u. Reinigung von alkoholbeständigem medizinischen Inventar sowie Flächen aller Art. Aufgrund der parfüm- und rückstandsfreien Formulierung besonders geeignet für Lebensmittelindustrie, Küchen und Küchenbereiche in medizinischen Einrichtungen.

### Anwendung

Zu desinfizierende, gereinigte Flächen vollständig mit konzentriertem DESIFOR-QUICK PLUS benetzen und abtrocknen lassen. Einwirkzeiten beachten.

### Technische Informationen

Karton mit 2 Fl. à 1 Liter,  
2 Sprühaufsätze

Art.-Nr. 00523

### Hinweis

Nicht anwenden auf alkoholempfindlichen Oberflächen (z. B. Acrylglas). Ausbringung max. 50 ml/m<sup>2</sup>. Die ausgebrachte Gesamtmenge pro Raum darf nicht mehr als 100 ml/m<sup>2</sup> Raumgrundfläche betragen.

### Wirkstoffe

100 g Lösung enthalten 45,0 g Ethanol.

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): Achtung; GHS02

Baua Reg.-Nr. N-22859, N-22860  
CHZN1998



Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/Einwirkzeit	Anmerkung
Humanmedizinischer Bereich: VAH-Liste, ohne Mechanik, hohe Belastung, Bakterizid und Levurozid	konz. 5 Min.	lt. Gutachten wirksam nach 1 Min.
Lebensmittel, Industrie, öffentliche Einrichtungen: bakterizid u. levurozid (EN 1276, EN 1650, EN 13697)	konz. 1 Min.	20 °C hohe u. niedrige Belastung
Tuberkulose-Bakterien ( <i>M. terrae</i> )	konz. 30 Sek.	gem. EN 14348, niedrige Belastung
begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	konz. 30 Sek.	gem. DWV-/RKI-Leitlinie 08/2008
Noroviren (MNV)	konz. 1 Min.	gem. EN 14476
Rotaviren	konz. 30 Sek.	gem. EN 14476

### Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
- Frei von Aldehyden
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Exzellente Reinigungseigenschaften
- Haltbarkeit geschlossen: siehe Etikett
- Haltbarkeit geöffnet: 36 Monate
- IHO-gelistet
- VAH-gelistet
- HACCP-konform

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 0020

pH conc **0 2 4 8 10 12 14**

**DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA**  
Taanusstraße 19 · 80807 München  
Tel. +49 89 3506080  
info@dr-schnell.de  
www.dr-schnell.com

*Wir leben Hygiene*  
**DR.SCHNELL**  
QUALITÄT UND SERVICE