

neodisher® TN

Flüssiges, neutrales Klarspülmittel für schwer benetzbare Materialien



Hauptanwendungsbereiche:

Einsatz als Klarspülmittel für Bettgestelle und Transportwagen in Dekontaminationsanlagen.
Einsatz als Klarspülmittel für Kunststoffgeschirr in Geschirrspülmaschinen.

Eigenschaften:

neodisher TN ist ein pH-neutraler, konzentriert eingestellter Klarspüler, mit Korrosionsschutz, der speziell auf die verschiedenen Materialien von Bettgestellen und Nachtschränken abgestimmt wurde. Die Teile werden gleichmäßig benetzt und trocknen tropfen- und streifenfrei ab. Aufgrund der sehr guten Benetzungseigenschaften eignet sich neodisher TN auch zum Einsatz in Geschirrspülmaschinen, in denen schwer benetzbare Kunststoffteile gespült werden.
neodisher TN eignet sich besonders für weiche Betriebswässer und arbeitet schaumarm bei Temperaturen über 35 °C.

Anwendung und Dosierung:

0,1 - 0,8 ml/l je nach Art des Behandlungsgutes.

Bettgestelldekontaminationsanlagen:

Bettgestelle
Nachtschränken
OP-Schuhe

Reinigung und Desinfektion:
neodisher Dekonta 3 - 8 ml/l

Klarspülung:
neodisher TN 0,5 ml/l

Geschirrspülmaschinen:
Geschirr, bevorzugt aus Kunststoff

Reinigung:
alle neodisher Reiniger
für den Bereich Küchenhygiene
Klarspülung:
neodisher TN 0,5 ml/l

Nicht mit anderen Produkten mischen.

Technische Daten:

Spezifisches Gewicht (20 °C): 1,0 g/cm³
pH-Bereich (bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C) 0,1 - 0,8 ml/l: 6,7 - 7,0
Viskosität (Konzentrat, 20 °C): < 50 mPas

Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe für Wasch- und Reinigungsmittel gemäß EG-Empfehlung 89/542/EWG:
< 5 % Phosphonate (Säure), Polycarboxilate
15 - 30 % nichtionische Tenside
außerdem Konservierungsmittel

CE- Kennzeichnung:

neodisher TN erfüllt die Anforderungen für Medizinprodukte gemäß Richtlinie 93/42/EWG.

Lagerhinweise:

Frostfrei lagern. Bei sachgemäßer Lagerung 3 Jahre lagerfähig.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

neodisher TN ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Zubereitungsrichtlinie 99/45/EG.

Weitere Sicherheits- sowie Umweltinformationen finden Sie in den EG-Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik „Service“ verfügbar.

MB 3115/2-1
03/03



Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85, D - 20539 Hamburg

Telefon: (040) 789 60 - 0
Telefax: (040) 789 60 - 120

E-Mail: info@drweigert.de
Internet: www.drweigert.de

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.