

# neodisher® MediKlar

Nachspülmittel zum Einsatz in Spezialspülmaschinen



- Hauptanwendungsbereiche:** Zur Anwendung in Nachspülprozessen bei der maschinellen Aufbereitung von Medizinprodukten wie chirurgischen Instrumenten inkl. Augeninstrumenten, Anästhesieutensilien, Containern, flexiblen Endoskopen und Implantaten sowie Babyflaschen.
- Eigenschaften:** neodisher MediKlar ist ein Nachspülmittel speziell für die oben genannten Anwendungsbereiche. Aufgrund der sehr guten Benetzungseigenschaften von neodisher MediKlar trocknet das Behandlungsgut schnell und streifenfrei ab. neodisher MediKlar verkürzt die Trocknungszeit deutlich und bewirkt somit eine Reduzierung des Zeit- und Energiebedarfs bei der maschinellen Aufbereitung.
- Zubehörteile von Anästhesieutensilien aus Polysulfon (PSU) sowie aus Polyphenylensulfon (PPSU) wie z.B. Konnektoren von Larynxmasken, Ventile, Adaptoren und Teile von Instrumenten-Containerdeckeln können bei Kontakt mit Nachspülmitteln herstellungsbedingt Spannungsrisse bilden. Sie sind jeweils auf Eignung vorzuprüfen.
- Anwendung und Dosierung:** In Spezial-Spülmaschinen:  
0,3 - 1,0 ml/l über geeignete Dosiergeräte dem Schlusspülwasser hinzufügen.  
Nicht mit den Konzentraten anderer Produkte mischen.  
Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche mit Wasser durchspülen.  
Die Aufbereitung muss entsprechend der RKI- Richtlinie und der Medizinproduktebetreiberverordnung mit geeigneten Verfahren durchgeführt werden.  
Nur für gewerbliche Anwendungen.
- Technische Daten:** Spezifisches Gewicht bei 20 °C: 1,0 g/cm<sup>3</sup>  
pH-Wert (bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C) 0,3 - 1,0 ml/l: ca. 5,7  
Viskosität (Konzentrat, 20 °C): < 50 mPas
- Inhaltsstoffe:** Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG- Detergenzienverordnung 648/2004:  
< 5 % anionische Tenside  
5-15 % nichtionische Tenside  
außerdem Konservierungsmittel (Quaternium 15)
- CE- Kennzeichnung** neodisher MediKlar erfüllt die Anforderungen für Medizinprodukte gemäß Richtlinie 93/42/EWG.
- Toxikologie:** neodisher MediKlar ist bei bestimmungsgemäßer Anwendung toxikologisch unbedenklich (Bewertung in Anlehnung an EN ISO 10993-1). Eine Zusammenfassung der toxikologischen Bewertung ist auf Anfrage erhältlich.
- Lagerhinweise:** Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen 0 und 30 °C einzuhalten. Bei sachgemäßer Lagerung 2 Jahre lagerfähig.  
Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol 
- Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:** neodisher MediKlar ist kein Gefahrstoff gemäß Zubereitungsrichtlinie 99/45/EG.  
Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.  
Weitere Sicherheits- sowie Umweltinformationen finden Sie in den EG-Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter [www.drweigert.de](http://www.drweigert.de) in der Rubrik „Service“ verfügbar.

MB 4045/2-4  
04/09



Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlenhagen 85, D - 20539 Hamburg

Telefon: (040) 789 60-0  
Telefax: (040) 789 60-120

E-Mail: [info@drweigert.de](mailto:info@drweigert.de)  
Internet: [www.drweigert.de](http://www.drweigert.de)

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.