



FLÄCHEN-
DESINFIZIATIONSMITTEL

Lysoform®-soft-Vlies

Flächenwischdesinfektionstücher

Universeller Vliestuchspender zum praktischen
Anwenden wässriger oder alkoholischer
Desinfektions- und Reinigungsmittel.



CE



LYSOFORM

Produktinformation

Bitte sorgfältig lesen

Lysoform®-soft-Vlies

im quadratischen Spender-Eimer mit transparenter Optik

EIGENSCHAFTEN

- ergiebig (100 Wischtücher im Format 300 x 300 mm)
- sparsam im Verbrauch, einzeln abreißbar
- reißfestes, saugfähiges und fusselarmes Vlies
- handlicher Spender-Eimer mit Tragegriff
- geeignet für alkoholische bzw. mit Wasser verdünnte Flächendesinfektions- und/oder Reinigungsmittel

Das Lysoform®-soft-Vlies-Spendersystem ist ein vielseitig einsetzbarer Vliestuchspender zum Nachfüllen.

Vorteile: Die Einwegtücher vermindern die Arbeitsvorbereitungszeit. Gleichzeitig sorgen die eingesetzten Materialqualitäten für einen geringen Vliestuch- und Desinfektionsmittelverbrauch.

Das Lysoform®-soft-Vlies-Spendersystem ist jederzeit und an jedem Ort einsatzbereit. (Tuchrolle einzeln verpackt im transparenten Folienbeutel).

AUFBAU UND MATERIAL

Das robuste Spendersystem (Polypropylen) besteht aus dem Lysoform®-soft-Vlies-Spender mit Tragegriff, der mit einer trockenen Vliesrolle aus einzelnen abreißbaren Lysoform®-soft-Vlies-Tüchern befüllt wird.

- Der Verschluss sorgt beim ordnungsgemäßen Verschließen für einen luftdichten Abschluss und verhindert damit das Austrocknen der Tücher.
- Lysoform®-soft-Vlies besteht aus saugfähigem, reißfestem, fusselarmen 2-Komponenten-Material (PP/PE). Das aufgenommene Desinfektionsmittel wird leicht an die zu desinfizierende Fläche abgegeben. (Auf die vollständige und ausreichende Benetzung der zu desinfizierenden Flächen ist zu achten!)
- Jeder Lysoform®-soft-Vlies-Rolle ist ein vom Anwender zu beschriftendes Sicherheitsetikett beigelegt. Auf diesem Sicherheitsetikett werden der Produktname, Charge, die Konzentration, Einwirkzeit, das Datum des Ansetzens der Lösung, die Haltbarkeit der Lösung (die Standzeit, z. B. 28 Tage, ist abhängig vom eingesetzten Präparat) vermerkt.



1. Handschuhe anziehen. Deckel der Spenderbox öffnen.



2. Vliesrolle mit Folienbeutel in den Eimer einsetzen.



3. Folienbeutel öffnen und über den Eimerrand ziehen. Dann die Desinfektionslösung gem. Herstelleranweisung zugeben. Durchtränkung abwarten (ca. 4 Stunden).



4. Vliestuch aus der Mitte durch die Öffnung des Deckels führen.



5. Etikett beschriften und aufkleben.

ANWENDUNG

Wichtig: Nur nasse Tücher, mit denen die zu behandelnden Flächen vollständig benetzt werden können, verwenden! Das Lysoform®-soft-Vlies-Spendersystem ist für den Einsatz mit Flächendesinfektionsmitteln aller Dosierungen geeignet. Das Lysoform®-soft-Vlies-Spendersystem wird mit mind. 2,2 Liter Desinfektionsmittellösung befüllt. Bei der Herstellung der Anwendungslösungen sind die anwendungs- und sicherheitstechnischen Hinweise zum jeweiligen Produkt, die Vorschriften der Berufsgenossenschaft und die DGHM/VAH-Einsatzkonzentrationen zu beachten. Ebenso zu beachten sind die Produktinformationen und die Sicherheitsdatenblätter sowie evtl. Entsorgungsvorschriften der Desinfektions- und/oder Reinigungsmittel-Hersteller! Verschluss nach Tuchentnahme schließen!

WIEDERBEFÜLLUNG

1. Vlies- und Flüssigkeitsreste mit Folienbeutel entsorgen.
2. **Deckel** des Lysoform®-soft-Vlies-Spendersystems vor jeder Neubefüllung gründlich mit einem in Desinfektionsmittel getränkten Lappen desinfizieren. (Spülmaschinengeeignet) Alle Teile trocknen lassen.
3. Neue Vliesrolle mit Folienbeutel und ausreichender Anwendungslösung, wie oben beschrieben, einsetzen. Deckel aufsetzen. Durchtränkung abwarten (ca. 4 h).
4. Neues, korrekt beschriftetes Etikett anbringen.

WARNHINWEIS

Das Lysoform®-soft-Vlies ist bestimmt für die Applikation von Desinfektions-, Reinigungs- und anderen Chemikalien. Sofern für die verwendete Gebrauchslösung Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen (siehe Produktinformation des Präparates) bei der Anwendung erforderlich sind, müssen vom Anwender alle dort empfohlenen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz und zur Arbeitssicherheit befolgt werden. Den befüllten Tücher-Spender nicht für langfristige Lagerung und Transport benutzen. Bei der Entsorgung von Behälter und Inhalt sind alle geltenden Gesetze und Vorschriften zu befolgen.

HINWEIS: Das Lysoform®-soft-Vlies-Reinigungssystem ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

BEFÜLLUNGSHINWEISE FÜR 2,2 LITER GEBRAUCHSLÖSUNG

Dosierung:

0,25 % = 2,2 l Wasser – 5,5 ml Wasser entnehmen und verwerfen, 5,5 ml Konzentrat dazufügen

0,50 % = 2,2 l Wasser – 11,0 ml Wasser entnehmen und verwerfen, 11,0 ml Konzentrat dazufügen

0,75 % = 2,2 l Wasser – 16,5 ml Wasser entnehmen und verwerfen, 16,5 ml Konzentrat dazufügen

1,00 % = 2,2 l Wasser – 22,0 ml Wasser entnehmen und verwerfen, 22,0 ml Konzentrat dazufügen

1,50 % = 2,2 l Wasser – 33,0 ml Wasser entnehmen und verwerfen, 33,0 ml Konzentrat dazufügen

VERSANDEINHEIT/PACKUNG

6 Spender-Eimer

6 Trockenrollen à 100 Tücher

Art.-Nr. 3400

Art.-Nr. 3402

Haben Sie spezielle Fragen, rufen Sie uns an.
Wir rufen sofort zurück.

Vous avez des questions? Contactez-nous au numéro suivant –
Nous vous rappellerons aussitôt!

D: 030 - 77 99 2-0
CH: 056 - 441 69 81



Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin
Telefax 030 - 77 99 2-269, Info.-Telefon 0700LYSOFORM
www.lysoform.de, e-mail: kontakt@lysoform.de



LYSOFORM
Schweizerische Gesellschaft für Antiseptie AG
Postfach 444, 5201 Brugg/Windisch
Telefon 056 - 441 69 81, Telefax 056 - 442 41 14